

## INFORMATION

### l'utilisation de Cytobrush / frottis buccales

- L'animal doit être à jeun au min. ½ heure avant la réalisation du frottis.
  
- Divers points lors de l'utilisation de cytobrush:
  - Frottez très fortement la joue lors du prélèvement du frottis, afin d'avoir assez de cellules de la muqueuse buccale sur la brosse. Il faudrait (si cela est possible) même qu'il y ait un peu de sang. Ne frottez pas avec timidité! Ainsi il y aura assez de matériel pour que le test génétique réussisse.
  
  - Il est préférable d'utiliser et de nous envoyer 2 Cytobrushs par chat.
  
- Après avoir utilisé les Cytobrushs:
  - Après le prélèvement, il est conseillé de laisser sécher les brosses à l'air pendant min. 2 heures, en les posant dans un récipient la brosse en haut. Si vous mettez les cytobrushs directement dans les tubes avant que la brosse ne soit sèche, il est possible que le matériel ADN se décompose.
  
  - Après que les cytobrushs soient sèches, elles doivent être mises dans les tubes stériles que nous envoyons avec (pour cela il faut couper le bout qui dépasse afin de pouvoir fermer le tube contenant le cytobrush).
  
  - Par ailleurs, si nous avons pas assez de cellules sur les frottis, vous devrez reprendre un prélèvement (cytobrush) ou bien il est préférable de nous envoyer un échantillon de sang EDTA. Dans ce cas, la première analyse envoyée sera gratuite.
  
  - Pour de plus amples informations concernant l'analyse, nous restons à votre entière disposition.